

Fälschungen von „Proximate PPH“, Stapler für die Prolaps- und Hämorrhoiden-Operation

Die Firma Ethicon Endo-Surgery (EES) hat Swissmedic informiert, dass gefälschte Packungen des Staplers Proximate PPH in Italien entdeckt wurden. Es betrifft Produkte mit der Los-Nummer F4N12N, Bestellnummer PPH03. EES orientierte ihre Schweizer Kunden bereits über die Fälschungen.

Es existieren keine näheren Angaben über Leistungsfähigkeit, mechanische Eigenschaften, Biokompatibilität oder Sterilität der Fälschungen. Gesundheitsschäden können bei einer Anwendung nicht ausgeschlossen werden.

Die Fälschungen können anhand folgender Merkmale erkannt und sollten auf keinen Fall angewendet werden:

- Faltschachtel: Es fehlt der Barcode an der Innenseite der seitlichen Laschen.
- Am Auslösehebel fehlt die Chargennummer.
- In Italien gefundene Fälschungen tragen die Los-Nummer F4N12N.

Bilder von Original und Fälschung finden Sie auf Seite 2.

Es ist nicht auszuschliessen, dass gefälschte Produkte auch in der Schweiz zum Kauf angeboten werden. Sofern Sie davon Kenntnis haben, ersuchen wir Sie dringend, Swissmedic darüber zu informieren.

Kontakt

Swissmedic, Abteilung Medizinprodukte
Hallerstrasse 7
Postfach
CH-3000 Bern 9
Tel. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46
e-Mail: medical.devices@swissmedic.ch

Weitere Informationen über Medizinprodukte finden Sie im Internet auf www.swissmedic.ch/md.asp

Original PROXIMATE® PPH

Fälschung



Bild 1: Barcode an einer der beiden seitlichen Laschen vorhanden



Fälschung: kein Barcode



Bild 2: Chargennummer am Auslösehebel



Fälschung: Keine Chargennummer am Auslösehebel