



Wichtige Sicherheitsinformation  
in Absprache mit  **SWISSmedic**

Im Juli 2026

## Wichtige Mitteilung zur Arzneimittelsicherheit


### Mounjaro® KwikPen® Injektionslösung in einem Fertigpen zum mehrmaligen Gebrauch – alle Dosierungen (69696)

Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic möchten wir Sie darauf hinweisen, **dass es für eine sachgemässe Verwendung des Mounjaro® KwikPen® unbedingt notwendig ist, die Bedienungsanleitung sowie die Gebrauchsinformationen für Patient:innen sorgfältig zu befolgen.**

Insbesondere weisen wir darauf hin, **dass der Pen insgesamt maximal 8 Mal (falls nötig) entlüftet werden darf, um sicherzustellen, dass alle vier Dosen korrekt verabreicht werden können. Zudem sollten Patient:innen den Kalendertag notieren, an dem die jeweilige Dosis injiziert wurde und jeweils mit der Kennzeichnung Injektion 1 festhalten, wann ein neuer Pen angefangen wurde.**

Mounjaro® KwikPen® ist mit 3,2 ml Arzneimittel befüllt. Nach korrektem Entlüften und Verabreichung der vier vollständigen Dosen verbleibt eine Restmenge im Pen zurück. Diese Restmenge entspricht keiner vollständigen Dosis und kann nicht verabreicht werden, da sich der Pen automatisch nach Verabreichung der vierten Dosis sperrt.

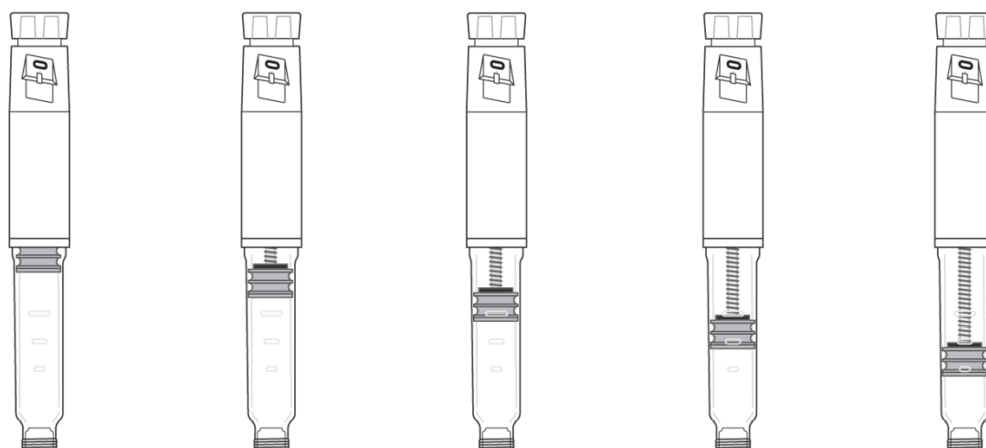

|                                        |                                        |                                        |                                        |                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kolbenposition<br>vor der<br>Anwendung | Kolbenposition<br>nach der<br>1. Dosis | Kolbenposition<br>nach der<br>2. Dosis | Kolbenposition<br>nach der<br>3. Dosis | Kolbenposition<br>nach der<br>4./letzten Dosis |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

Ab August 2026 wird eine neue Version mit reduziertem Füllvolumen der Patrone erhältlich sein. Die Reduktion des Füllvolumens stellt sicher, dass Patient:innen nach Verabreichung von vier Dosen klar erkennen können, dass der Pen leer ist. Während einer Übergangszeit werden beide Versionen (die ursprüngliche und die aktualisierte Version) verfügbar sein.

### **Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW)**

Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic Vigilance System (EViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informationen hierzu sind unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) zu finden.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an [Medinfo\\_SwissHUB@lilly.com](mailto:Medinfo_SwissHUB@lilly.com), +41 44 654 57 52.

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen Grüßen,

Eli Lilly (Suisse) SA